

Gebrauchsanleitung für zusätzliche Einlegesohlen

Ortho**Feet**[®]



Orthofeet-Schuhe werden mit zwei zusätzlichen Einlegesohlen geliefert, 1.6 mm (dünnere Sohle, blau) und 3.2 mm (dickere Sohle, grün), mit denen Ihre Schuhe in der Passform (enger) angepasst werden können.

Wenn die Schuhe zu weit sind, oder Ihre Ferse nicht fest im Schuh sitzt:

- 1.** Ziehen Sie die orthopädischen Einlegesohlen, die sich bereits im Schuh befindet, heraus.
- 2.** Legen Sie die blaue, zusätzliche Einlegesohle (1/16") in den Schuh und legen Sie dann die orthopädische Einlegesohle darauf (in den Schuh).
- 3.** Wenn die Schuhe weiterhin zu weit sind, können Sie die grüne, zusätzliche Einlegesohle (3.2 mm) anstelle der blauen Einlegesohle (1.6 mm) verwenden.
- 4.** Wenn die Schuhe immer noch zu weit sind, können Sie beide: sowohl die grünen als auch die blauen Einlegesohlen unter die orthopädische Einlegesohle legen.

